

シゲマツ

創業1917年

Surgical N95マスク

2024年 7月現在

医療用N95マスク

DD02-N95+S

日本製

認証番号 TC-84A-9373


ウイルス対策に

手術室等の医療現場に

救急・救助活動に

ラムダライン
LINE

ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりとキープするマスクの愛称。

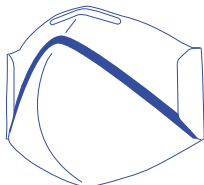

サージカル
Surgical
N95
認証品

保存期限

製造日から
(未開封の状態)

6年

サージカルN95とは

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)規格N95への適合を認証したマスクで、さらにFDA(米国食品医薬品局)が要求する次の基準を満たしています。

液体防護性

耐人工血液浸透性 レベル3適合(ASTM F 1862)

人工血液を160mmHgの圧力で噴射した場合の、浸透の有無を確認します。

難燃性

可燃性 クラス1適合(16 CFR Part 1610)

試験片に炎を1秒間当て、燃え尽きるまで3.5秒以上であることが求められています。

生体適合性

細胞毒性試験、炎症及び皮膚感作性試験をクリア

梱包

個装タイプ

個装で
衛生的



数量: 1箱10個入 小箱寸法: 約108×183×95mm

袋タイプ

毎日の
作業に



保管に便利なチャック付

数量: 1袋10個入 袋寸法: 約330×55×220mm

3つの機能でもれなく安全

1

アジャスター

しめひもの長さ調節ができます。
材質: ポリウレタン

2

クッション

内側のクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすることができます。
材質: ポリウレタン

3

鼻当て

外側の鼻当てによって、鼻の形に合わせることができます。
材質: ポリエチレン



ぴったり
密着!

マスク内側

装着例



保護めがねやフェイスシールドと併用ができます。

動画
「装着・外し方」



リーフレット
「装着方法」



密着性の確認方法

■ シールチェック(ユーザーシールチェック)

密着性の良否を確認する機器(マスク内圧・フィッティングテスター等)を用いる(定量法)か、次の方法(定性法)でご確認ください。

マスク全体を両手で覆い、

陽圧法 息を吐きます。

マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、
密着性は良好です。

陰圧法 すばやく息を吸います。

マスクと顔の間から空気が流入しなければ、
密着性は良好です。
(マスクが顔に吸い付く感じです。)



■ フィットテスト

MNFT PRO(マスク内圧・フィッティングテスター)は、呼吸用保護具の内側と外側の空気圧の個数を測定する装置で、フィットテスト用としてフィットファクタを求めることができます。

リーフレット
「MNFT PRO」



被験者



実施者

密着性を
視覚化

電動ファン付き呼吸用保護具

Sy28R-MED

- 呼吸が楽な呼吸連動形のマスクです。
- 面体内圧を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。
- 公称稼働時間10時間以上で、1日の業務をしっかりサポートします。

動画
「Sy28R-MED」



日本の国家検定を受検していませんので、日本国内での労働衛生対策用としては使用しないでください。

● 改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ● カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001	横浜 045(314)0921	倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733	上越 025(545)4350	広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566	名古屋 052(682)4798	新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081	大阪 06(6953)8521	福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004	姫路 079(267)6788	