

使い捨て式防じんマスク・N95マスク DD11シリーズ装着方法


2022年10月現在

しめひもも2タイプから選べます。



フック式

構成

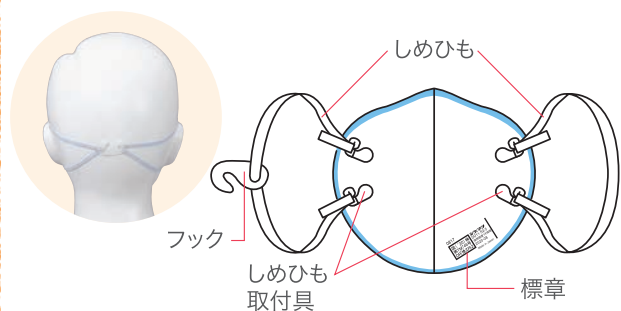


●ラインナップ

使い捨て式防じんマスク DD11V-S2-5 DD11-S2-5




1 標章をあご側にし、左右のしめひもを耳の後ろに引っ張ります。

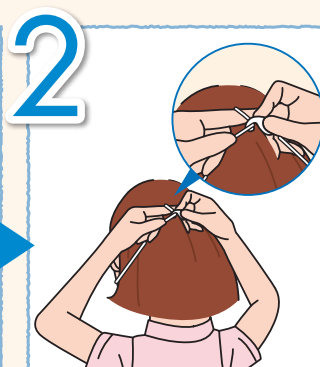

2 しめひもをフックで接続します。


2本紐式

構成

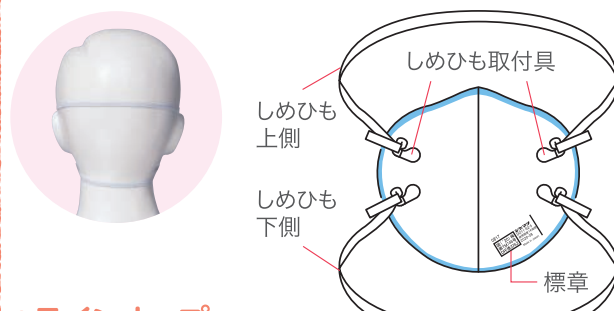


●ラインナップ

使い捨て式防じんマスク DD11V-S2-5 DD11-S2-5
N95マスク DD11-N95-5

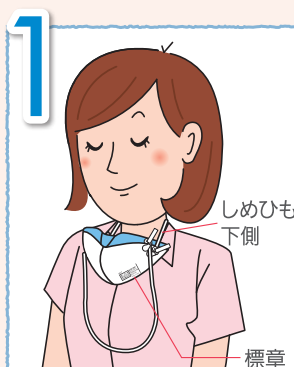

1 標章をあご側にし、しめひも下側を首にかけます。

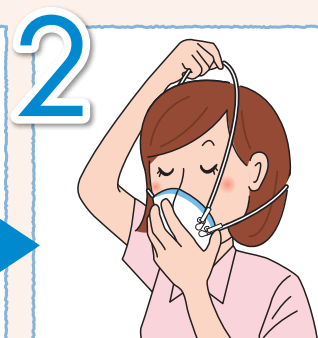

2 片手でマスクを鼻口部にあて、もう片方の手でしめひも上側を頭頂部にかけます。



3 マスクがゆるい場合は、しめひも取付具を軽く押えてしめひもの端を後方に引っ張り、しめひもの長さを調節します。

⚠ 引っ張り方によっては、しめひもがしめひも取付具から外れる場合があります。外れた場合は、再度しめひも取付具に取付けてください。

4 密着性の確認 (シールチェック ユーザーシールチェック)

密着性の良否を確認する機器(マスク内圧・フィッティングテスター等)を用いる(定量法)か、次の方法(定性法)でご確認ください。

マスク全体を両手で覆い、

陽圧法 息を吐きます。

マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。

陰圧法 すばやく息を吸います。

マスクと顔の間から空気が流入しなければ、密着性は良好です。(マスクが顔に吸い付く感じです。)

※排気弁付きは、陰圧法でシールチェックをしてください。



正しく装着して
漏れ込みを
防ぎましょう!

漏れがある場合は、次を調節してください。

●マスクの位置

マスクの両端を持ち、顔から浮かせて動かします。

●しめひも